



GEMINI AS

染色
效果清晰
始终如一

自信来源于效果清晰、对比度明确的染色

Epredia 组织学和细胞学染液为医院、癌症中心和私人实验室提供一致清晰的染色结果。

高性能

- 实现最佳染色性能
- 细胞核清晰度和卓越的对比度
- 提供多种易于使用的特殊染色试剂

智能工作流程优化

- 一流的仪器设计为节省空间，并自动优化染色程序
- 使用广泛的染色架和配件进行手动染色程序

整体解决方案

- 易于倾倒的脱水试剂可减少溢出
- 使用试剂级清洁剂确保一致且高质量的染色结果
- Epredia 延伸服务合同包括预防性维护和彻底、快速的维修，可让您高枕无忧地使用我们的产品，确保尽可能减少实验室中的停机时间



Gemini AS 染色机



功能多样

- 26 个试剂站, 足以运行多个方案。用户定义的方案完全可编辑, 使操作员可以一次执行多项操作, 从而节省时间
- 紧急启动功能让用户有机会优先处理“紧急”玻片篮, 而不会影响已在处理的玻片篮
- 可自由选择 EpreDia 染液和试剂
- 与 EpreDia 的系列封片机和玻片架传送系统兼容, 以减少实验室所用的时间
- 五个可选的加热缸可满足大批量情况下的玻片干燥

自动优化

- 软件操作简单, 可以协调染色架的染色, 分配试剂, 优化试剂布局, 为每种方案计算最有效的路线, 以最大程度地提高通量并尽可能减少试剂残留
- 任意步骤启动功能可从任何一步启动方案
- 可以设置质控系统, 用于监控试剂的使用次数以及每批次检测量
- 密码保护系统可保护操作员的自定义方案和设置

省空间设计

- 独特的小占地空间使 Gemini AS 染色机可放入任何实验室空间
- 通过低层的转台, 可以轻松转动试剂站点, 方便操作

物理规格

尺寸 (D x W x H):
31 x 28.5 x 35 in
(79 x 72 x 88.8 cm)

重量: 192 lbs / 87 kg

电源要求:
在 100-240 VAC、50/60 Hz 下为
300 VA

包括:

非加热染色机; 提供并装有
35 个试剂缸 (320 mL)。
加热染色机; 提供并安装
30 个试剂缸 (320 mL) 和
五个加热缸。两种型号都包含活
性炭过滤器、玻片架/托架
(5 个/包 x 2)、三孔冲水缸、
试剂缸盖-单缸 (6 个/包)、
试剂缸盖-多缸 (4 个/包)、
2.5 m 冲水进水软管、备用试剂
缸 (3 个/包)、操作员指南、操作
员指南光盘、快速参考卡和维修
记录簿

描述	订单号
Gemini AS 带 5 个加热站	A81500005

配件	订单号
活性炭过滤器	9990610
静态冲水位套件	A78010226
排气适配器套件	A78010467
冲水缸, 3 缸	A78010201
冲水进水软管	AP14160
1 GB USB 闪存驱动器	AP17385
试剂缸 (3 个/包)	A78010487
试剂缸盖, 多罐 (4 个/包)	A78010488
试剂缸盖, 单罐 (6 个/包)	A78010489
玻片架/托架 (每个可容纳 20 张玻片)	A78010466
Gemini 玻片架 — 黑色滑条 (与 ClearVue 兼容) (5 个/包)	A79210064
Gemini 玻片架 — 白色滑条 (与 ClearVue 兼容) (5 个/包)	A79210065
Sakura™ 玻片架托架	A78010404
罐嵌件, 用于手动封片 (3 个/包)	A78010505
大玻片所用的玻片架适配器。玻片规格最大为 75 毫米 x 58 毫米 (2 英寸 x 2¼ 英寸) (45 x 58 mm) (5 个/包)	



您将需要：



染色组件



染色配件



染色缸



染色试剂

您知道 EpreDia 提供染封工作站解决方案吗？

敬请了解**玻片架传输系统**, 该产品与 ClearVue 封片机和 Gemini AS 玻片染色机兼容



手动染色站

手动染色站非常适合满足独特的染色需求、冷冻切片或特殊染色。

- 使用与 Gemini AS 玻片染色机相同的染色缸和玻片篮
- 最适合小批量程序
- 坚固的盖子可密闭染色槽，以最大程度地减少挥发
- 玻片篮设计为将玻片锁定到位，即使翻转也能固定
- 玻片篮储存 20 张标准显微镜玻片
- 槽中可装 11 盎司 (320 mL) 的试剂

物理规格

尺寸：

(D x W x H):
7.1 x 39.4 x 4.7 in
(18 x 100 x 12 cm)

包括：

套件包括一个钢支架、一套完整的十四号染色槽 (编号 A78010487) 和五个带支架的玻片篮 (编号 A78010466)；5 个/包)

描述	订单号
手动染色站	A78500001

配件	订单号
染色缸 (3 /包)	A78010487
试剂槽盖, (6 个/包)	A78010489

您将需要：





Linistat 线性染色机

Linistat 线性染色机是一种紧凑、高效的染色设备，非常适合 H&E 冷冻切片，该产品可简化实验室的冷冻切片工作流程。

- 小巧的设计使 Linistat 可放置在大多数的冷冻切片机上方
- 十四个染色站(每个二十秒)
- 可用流水功能和容纳 13 张玻片的收集槽
- 染色时间少于五分钟
- 对于需要手动染色的情况，技术人员可以直接将玻片浸入染色缸，不需要设置单独的染色缸
- 不同颜色的玻片夹，可以对应不同玻片颜色以及不同颜色包埋剂 Cryochrome™ 包埋的冰冻切片

物理规格

尺寸 (D x W x H):
7.5 x 25 x 7.5 in
(19 x 64 x 19 cm)

间隙高度: 10.25 in

重量: 16.3 lbs (7.3 kg)

电源要求:
115 Vac, 60 Hz, 1.0A
230 Vac, 50 Hz, 0.5A

包括:

单站染色皿、双站染色皿、
玻片夹和冲洗水管套件。†

†内容、包装和内含物数量如有更改，恕不另行通知。

描述

Linistat; 220 - 240 V; 50 Hz

订单号

B1000201

配件

配件	订单号
双站染色缸 (5 个/包)	6754004
单站染色缸 (10 个/包)	6754003
玻片夹, 粉红 (25 个/包)	6754005
玻片夹, 蓝色 (25 个/包)	6754006
玻片夹, 黄色 (25 个/包)	6754007
玻片夹, 绿色 (25 个/包)	6754008
防挥发盖 (单缸)	231644
防挥发盖 (双缸)	231645
防挥发盖 (三缸)	231646
不锈钢储存槽	A79830072
不锈钢防蒸发盖; 18 in(46 cm)	A79830022

您将需要:



染色组件



染色配件



染色缸



染色试剂



玻片架传输系统

玻片架传输系统 (SBTS) 免除了手动将玻片篮从 Gemini AS 玻片染色机转移到 ClearVue 封片机的过程。

- 借助从 Gemini AS 玻片染色机至 ClearVue 封片机的自动传送, 可节省团队的宝贵时间。
- 只需将玻片放入 Gemini AS 玻片染色机, 就可以进行其他任务而不会分散注意力
- 当玻片在 ClearVue 封片机中完成封片后, 系统将提醒您
- Gemini AS 玻片染色机、玻片架传输系统和 ClearVue 封片机的组合系统占用空间小, 几乎可无缝融入任何实验室工作流程
- 仅与 2018 年 2 月之后制造的 Gemini AS 和 ClearVue 系统兼容

描述	订单号
玻片架传输系统	A84500001

配件	订单号
SBTS 玻片架 (黑色滑条, 5 架)	A84510032
SBTS 玻片架 (白色滑条, 5 架)	A84510041
操作手册	A84510100
文件光盘	A84510100-CD
二甲苯托盘	A84530101
手动卸载工具	A84530110
洗瓶	AP18730

物理规格

尺寸 (D x W x H):
53 x 35 x 43 cm

重量:
44 lbs, 20 kg

电源要求:
100-240 Vac, 50/60 Hz, 600 VA

您将需要:





手动染色全套组件



手动染色全套组件 110

- 手动染色全套组件 110 包括染色架/柄 (编号 113)、染色皿 (编号 112) 和盖子 (编号 111)
- 染色架 113 由不锈钢制成, 最多可储存 30 张玻片; 最大玻片尺寸为 3 x 2 in (76 x 51 mm)
- 染色皿 112 由不锈钢制成, 内部尺寸为 4.3 x 3.35 x 2.95 in (110 x 85 x 75 mm)
- 在满载的染色架上, 染色皿最多可储存 350 mL 溶液
- 染色皿 111 由不锈钢制成



手动染色全套组件 121

- 手动染色全套组件 121 包括染色架/柄 (编号 113)、染色皿 (编号 122) 和盖子 (编号 123)
- 染色架 113 由不锈钢制成, 最多可储存 30 张玻片; 最大玻片尺寸为 3 x 2 in (76 x 51 mm)
- 染色皿 122 由非高温高压消毒玻璃制成, 内部尺寸为 4.3 x 3.6 x 2.6 in (110 x 92 x 67 mm)
- 在满载的染色架上, 染色皿最多可储存 350 mL 溶液
- 染色皿盖 123 由不锈钢制成



手动染色全套组件 130

- 手动染色全套组件 130 包括染色架/柄 (编号 120)、染色皿 (编号 131) 和盖子 (编号 132)
- 染色架 120 由不锈钢制成, 最多可储存 60 张玻片; 最大玻片尺寸为 3 x 2 in (76 x 51 mm)
- 染色皿 131 由非高温高压消毒玻璃制成, 内部尺寸为 7.95 x 4.4 x 2.8 in (202 x 112 x 72 mm)
- 在满载的染色架上, 染色皿最多可储存 750 mL 溶液
- 染色皿盖 132 由不锈钢制成

描述	订单号
手动染色全套组件 110	110
染色架	113
染色皿	112
染色皿盖	111
手动染色全套组件 121	121
染色架	113
染色皿	122
染色皿盖	123
手动染色全套组件 130	130
染色架	120
染色皿	131
染色皿盖	132

Epredia 染色配件



垂直染色架

- 由焊接不锈钢制成, 经久耐用
- 垂直储存 38 张 (76 x 26 mm) 玻片
- 玻片可装入单独的插槽中, 以实现自由交换和快速排出染色试剂
- 测量尺寸为 2.5 x 2.35 x 4.1 in(64 x 60 x 105 mm)



Shandon 玻片架

- 具有单独标记的插槽
- 垂直储存 10 张 (76 x 26 mm) 玻片
- 可配合使用冷冻染色套件玻璃烧杯
- 不适用于 Coplin 染色罐或 Shandon 垂直染色罐 (编号 140)



塑料玻片夹

- 塑料玻片夹由模制塑料制成, 该材料可经受染色用化学物质的侵蚀, 包括特殊染料
- 可储存 5 张 (76 x 26 mm) 玻片
- 可以在高达 80 °C 的温度下使用
- 适用于 Coplin 染色罐和圆口染色罐



Angus-Ranieri™ 玻片架

- 最多可储存 40 张 76 x 26 mm 玻片



盖玻片染色架

- 焊接不锈钢架可牢固地储存 22 mm 或 24 mm 盖玻片
- 提供两种尺寸
- 五张盖玻片架可放入垂直染色罐 140 或玻璃烧杯 146
- 三十张盖玻片架包括一个弹簧式可拆卸手柄, 尺寸为 4.0 x 1.1 x 1.2 in (102 x 28 x 31 mm)



聚缩醛槽/皿

- 聚缩醛槽/皿具有模制的黑色聚缩醛槽和紧密贴合的盖子
- 可用于酒精和二甲苯, 但不能用于苯酚
- 容量: 170 mL



带刻度的不锈钢烧杯

- 带刻度的不锈钢烧杯在内部显示有刻度, 刻度单位为毫升和液体盎司
- 由手术级不锈钢制成

配件	订单号
垂直染色架	143
Shandon 玻片架	147
塑料玻片夹	1975
Angus-Ranieri 玻片架	
盖玻片染色架 (30 张盖玻片)	114
盖玻片染色架 (5 张盖玻片)	116
聚缩醛槽/皿	
带刻度的不锈钢烧杯 (940 mL)	8532
带刻度的不锈钢烧杯 (470 mL)	8516

染色罐



Coplin 染色罐

- 带有内凹槽的大容量透明玻璃罐
- 可储存 10 张玻片 (76 x 26 mm) (背靠背)
- 包括玻璃盖或塑料螺口盖



Coplin 塑料染色罐

- 带有内凹槽的可微波高密度聚乙烯罐
- 可背靠背放置 10 张玻片
- 用于一般用途
- 直径 40 mm; 圆形、锥形顶部
- 包括圆顶螺旋盖



Columbia 染色罐

- 塑料染色罐, 可储存 22 x 22 mm 盖玻片
- 容量要求低 (8 mL), 适合用于昂贵的试剂
- 随附塑料螺旋盖

防溢染色罐

- 可储存 10 张玻片, 每个槽一张
- 1.4 x 1 in(36 x 26 mm) 矩形顶和罐体平直
- 带有内凹槽的聚丙烯结构
- 集成式卡扣盖, 内衬试剂防溢漏盖密封
- 可微波加热

描述	数量	订单号
Coplin 染色罐		
玻璃盖	单件	E94
螺口盖	单件	107
Coplin 塑料染色罐		
Coplin 塑料染色缸	单件	194
Columbia 染色罐		
Columbia 染色缸 (可放入 4 张盖玻片, 8 张背靠背)	单件	E93
塑料防溢玻片罐		
塑料防溢玻片罐	单件	1001362
塑料防溢玻片罐	12 个/包	1001363
塑料防溢玻片罐	48 个/箱	1001361

Richard-Allan Scientific Signature 染料

Richard-Allan Scientific 苏木精 7211

Richard-Allan Scientific Signature Series 苏木精 7211 是独特配方的产品, 其效果超出 Gill 或 Harris 苏木精。

- 对酸性粘多糖 (粘蛋白) 染料无亲和力
- 可清晰的展现细胞核染色质形态

Richard-Allan Scientific 苏木精 7212

Richard-Allan Scientific Signature Series 7212 是由多种染料混合形成的独特的配方。

- 快速的进行性染色, 无需过滤即可使用
- 不含氧化汞
- 对粘蛋白染色的亲和力很低
- 可产生清晰, 鲜明且颜色更深的细胞核染色

Richard-Allan Scientific 苏木精 1

Richard-Allan Scientific Signature Series 苏木精 1 产生的染色强度类似于 Gill™ 1、2 和 3 苏木精 (取决于时间)。

- 无需进行分化, 但是应使用分化液 1 来消除由于使用过多的水浴粘合剂而引起的任何背景染色。
- 快速染料, 无需过滤即可使用
- 静置或暴露在寒冷天气下不会结晶

Richard-Allan Scientific 苏木精 2

Richard-Allan Scientific Signature Series 苏木精 2 产生的染色强度类似于 Harris 苏木精。

- 与许多同类产品不同, 苏木精 2 不含氧化汞, 不会每天在表面形成金属光泽
- 无需进行分化, 但是应使用分化液 2 来消除由于使用过多的水浴粘合剂而引起的任何背景染色。
- 推荐用于冰冻切片
- 无需过滤即可使用
- 静置或暴露在寒冷天气下不会结晶

Richard-Allan Scientific 伊红-Y

Richard-Allan Scientific Signature Series 伊红-Y 是一种快速作用型的醇溶性, 可出色清晰地描绘细胞质组分的轮廓。

- 细胞核与细胞质之间可形成清晰的颜色对比
- 不同程度的红色可以区分肌肉、红细胞和结缔组织
- 严格的质量保证确保产品一致性和长使用寿命
- 定量测试可避免调整稀释度或时间

Richard-Allan Scientific 蓝化液

Richard-Allan Scientific Signature Series 蓝化液经过预混合, 可立即使用。

- 加入缓冲液以确保适当的碱度 (pH = 8.0)
- 只需一分钟的水冲洗, 相比之下, 常规蓝化液需要冲洗多达 5 分钟
- 确保鲜明清晰的细胞核细节

Richard-Allan Scientific 分化液 1、2

Richard-Allan Scientific Signature Series 分化液 1 和 2 采用独特的乙酸配方, 旨在消除因过度使用组织粘合剂引起的背景染色, 及增加细胞透明度。

- 分化液 1 和 2 都可以选择性地从多余的粘合剂中去除苏木精染色, 而不会影响细胞核染色
- 使用分化液 1 或 2 可提升细胞核与细胞质之间的颜色对比

描述	数量	订单号	描述	数量	订单号
Richard-Allan Scientific 苏木精 7211			Richard-Allan Scientific 蓝化液		
1 pt (0.47 L)	4 瓶/箱	7211	1 gal (3.8 L)	单件	7301
1.32 gal (5 L)	单件	7211L	1 gal (3.8 L)	4 瓶/箱	7341
Richard-Allan Scientific 苏木精 7212			1.32 gal (5 L)	单件	7301L
1 pt (0.4 L)	4 瓶/箱	7212	Richard Allan Scientific 分化液 1、2		
1.32 gal (5 L)	单件	7212L	透明剂 1		
Richard-Allan Scientific 苏木精 1			1 gal (3.8 L)	单件	7401
1 pt (0.47 L)	4 瓶/箱	7221	1 gal (3.8 L)	4 瓶/箱	7441
1.32 gal (5 L)	单件	7221L	透明剂 2		
Richard-Allan Scientific 苏木精 2			1 gal (3.8 L)	单件	7402
1 pt (0.47 L)	4 瓶/箱	7231	1 gal (3.8 L)	4 瓶/箱	7442
Richard-Allan Scientific 伊红-Y			1.32 gal (5 L)	单件	7402L
1 pt (0.47 L)	4 瓶/箱	7111			
1.32 gal (5 L)	单件	7111L			



Richard-Allan Scientific 常规染液

Richard-Allan Scientific Gill 1, 2, 3 苏木精

Richard-Allan Scientific™ Gill™ 苏木精是一种进行性细胞核染料。提供 3 种强度, 可让操作员完全控制染色强度。

- Gill 1 建议用于细胞学
- Gill 2 可应用于组织学和细胞学
- Gill 3 用于组织学
- 所有产品均经过预混合, 可立即使用

Richard-Allan Scientific 改良版 Harris 苏木精

Richard-Allan Scientific 改良版 Harris 苏木精是一种退行性细胞核染料。

- 配方不含汞, 比传统的 Harris 苏木精更稳定
- 可用于组织学和细胞学
- 使用前应过滤

Richard-Allan Scientific 改良版 Mayer's 苏木精

Richard-Allan Scientific 改良版 Mayer's 苏木精是一种进行性细胞核染料。用该产品可以很好的避免过度染色, 但却可以实现非常鲜明的细胞核染色。

- 非常适合作为免疫组化和特殊染色中的复染剂
- 无需酸洗, 且粘蛋白不会染色
- 当需要较弱染色时, 推荐使用

Richard-Allan Scientific 分化液

Richard-Allan Scientific 分化液是一种盐酸变性酒精常规试剂。

- 在退行性染色中可实现不同批次染色结果的一致性
- 使苏木素和伊红的染色结果对比更加清晰

Richard-Allan Scientific 伊红-Y (醇溶)、带荧光桃红伊红-Y、饱和伊红-Y

Richard-Allan Scientific 伊红-Y (醇溶)、带荧光桃红伊红-Y、饱和伊红-Y 可满足广泛的客户需求。

- 对原材料和最终产品的严格质量控制确保了始终如一的优质产品
- 伊红-Y (醇溶) 可产生三种截然不同的颜色梯度从而使肌肉细胞、红细胞和结缔组织呈现不同的染色
- 带荧光桃红伊红-Y 可产生更加明亮的红色色调, 与伊红-Y (醇溶) 相比, 其细胞质颜色的区分度更高
- 饱和伊红-Y 是一种非常强烈且快速的复染剂, 可用于制备伊红-Y 工作液

粉状染料



经生物染色委员会认证

描述	数量	订单号
Richard-Allan Scientific Gill 1, 2, 3 苏木精		
Gill 1 苏木精		
1 pt (0.47 L)	4 瓶/箱	72404
1 gal (3.8 L)	单件	72411
Gill 2 苏木精		
1 pt (0.47 L)	4 瓶/箱	72504
1 gal (3.8 L)	单件	72511
Gill 3 苏木精		
1 pt (0.47 L)	4 瓶/箱	72604
1 gal (3.8 L)	单件	72611
Richard-Allan Scientific 改良版 Harris 苏木精		
1 gal (3.8 L)	单件	72704
1 gal (3.8 L)	4 瓶/箱	72711
Richard-Allan Scientific 改良版 Mayer's 苏木精		
1 pt(0.47 L)	4 瓶/箱	72804
Richard-Allan Scientific 分化液		
1 pt (0.47 L)	4 瓶/箱	74204
1 gal (3.8 L)	单件	74211
Richard-Allan Scientific 伊红-Y (醇溶)		
1 pt (0.47 L)	4 瓶/箱	71204
1 gal (3.8 L)	单件	71211
2.5 gal (9.46 L) 方容器	单件	71225

描述	数量	订单号
Richard-Allan Scientific 带荧光桃红伊红-Y		
1 pt (0.47 L)	4 瓶/箱	71304
1 gal (3.8 L)	单件	71311
Richard-Allan Scientific 饱和伊红-Y		
1 pt (0.47 L)	4 瓶/箱	71304
Richard-Allan Scientific 干粉染料		
伊红-Y 100 克	单件	90017
苏木精 25 克	单件	90022




Shandon 染色试剂

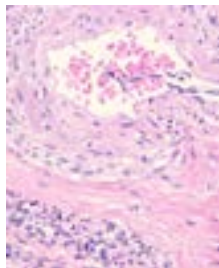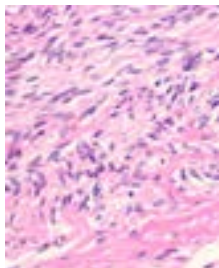

Shandon Harris 苏木精

Shandon Harris 苏木精无粘液染色。


- 提供酸化或非酸化配方
- 无汞
- 强染色、细胞核呈蓝黑色

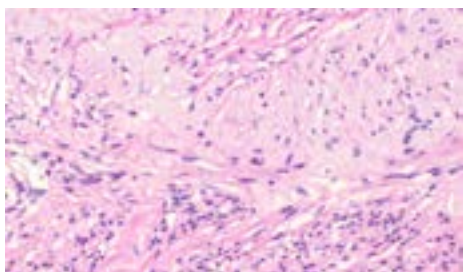

Shandon 速染苏木精

Shandon 速染苏木精无粘液染色。

- 可作为 Harris 或 Gill 苏木精的替代品。
- 根据制备不同, 染成蓝黑色至浅蓝色
- A 和 B 混合, 可以配置 1L 的苏木精

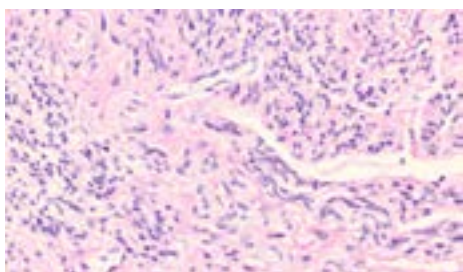

Shandon Gill 苏木精 1、2、3

Shandon™Gill™ 苏木精有粘液染色。


- Gill 1: 浅蓝色细胞核
- Gill 2: 中蓝色细胞核
- Gill 3: 蓝黑色细胞核



Shandon 蓝化液

Shandon 蓝化液可将苏木精染色的细胞核变为蓝色。

- 性质温和, 不会导致组织脱片 (此情况通常与氨水的使用有关)
- pH 控制, 以提供非常高效的蓝化效果
- 即用型

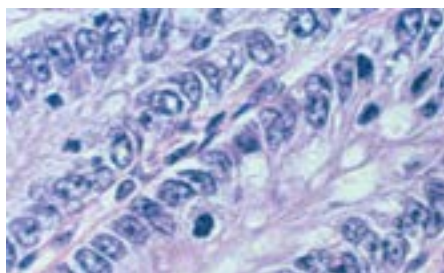

Shandon Nu-Clear

Shandon™ Nu-Clear™ 试剂是一种特殊配方的酸性乙醇溶液。酸性酒精通过从玻片上去除过量的苏木精来增强染色效果,从而改善了细胞的清晰度。也会从玻璃上去除残留的苏木精染色。

- 设计用于配合全线 EpreDia 自动染色机和手动方法。

Nu-Clear I

- 快速作用的溶液
- 建议用于大多数实验方案,该步骤用时 10 秒
- 配合 Harris 苏木精使用时尤其有帮助
- 可用于 EpreDia Gemini AS 玻片染色机

Nu-Clear II


- 浓度较低
- 该步骤建议用时 20 秒
- 可用于 EpreDia Linistat 染色机和其他线性染色机
- 建议配合 Gill 苏木精使用



Shandon 伊红-Y

Shandon 伊红-Y 是一种快速作用的细胞质复染剂。

- 产生一致的结果
- pH 值经过调整,有最大染色吸收效果
- 可产生鲜艳的染色
- 兼容所有明矾苏木精染色剂
- 可提供水溶性和醇溶性两种类型
- 即用型

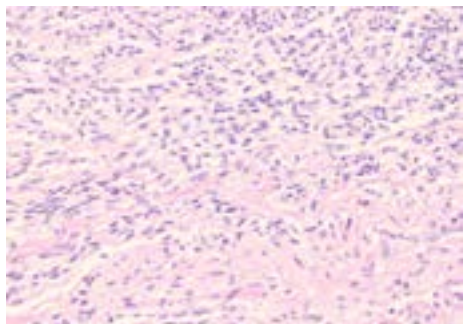

Shandon 速染伊红

Shandon 速染伊红可实现鲜艳稳定的染色

- 此速染伊红稳定、无沉淀, 无需过滤
- pH 值经过调整, 有最大染色吸收效果
- 可产生绚丽的染色
- 兼容所有明矾苏木精染色剂

描述	数量	订单号
Shandon Harris 苏木精 (非酸化)		
0.26 gal (1 L)	2 瓶/箱	6765001
1.06 gal (4 L)	单件	6765002
Shandon Harris 苏木精 (酸化)		
0.26 gal (1 L)	2 瓶/箱	6765003
1.06 gal (4 L)	单件	6765004
Shandon 速染苏木精		
制成 6 L	6 瓶/包	6765015
Shandon Gill 苏木精 1、2、3		
Gill 1 苏木精		
0.26 gal (1 L)	2 瓶/箱	6765005
1.06 gal (4 L)	单件	6765006
Gill 2 苏木精		
0.26 gal (1 L)	2 瓶/箱	6765007
1.06 gal (4 L)	单件	6765008
Gill 3 苏木精		
0.26 gal (1 L)	2 瓶/箱	6765009
Shandon 蓝化液		
0.26 gal (1 L)	2 瓶/箱	6769001
1.06 gal (4 L)	单件	6769002
Shandon Nu-Clear		
Nu Clear I 1.06 gal (4 L)	单件	6769008
Nu Clear II 1.06 gal (4 L)	单件	6769009


描述	数量	订单号
Shandon 伊红-Y (醇溶)		
0.26 gal (1 L)	2 个/箱	6766007
1.06 gal (4 L)	单件	6766008
Shandon 伊红-Y 水溶液		
0.26 gal (1 L)	2 瓶/箱	6766009
1.06 gal (4 L)	单件	6766010
Shandon 速染伊红 (醇溶)		
制成 6 L	6 瓶/包	6765040
Shandon 速染伊红水溶液		
制成 6 L	6 瓶/包	6765540

Richard-Allan Scientific™ Chromaview 特殊染色试剂盒

Richard-Allan Scientific™ Chromaview™ 特殊染色可作为一个系统来可视化特定细胞

引进系统的方法学, 为特殊染色提供高质、稳定、简单和经济的操作。可作为方便的即用型试剂盒或单个组件提供。每个试剂盒旨在利用 50 mL coplin 染色罐进行十次染色。



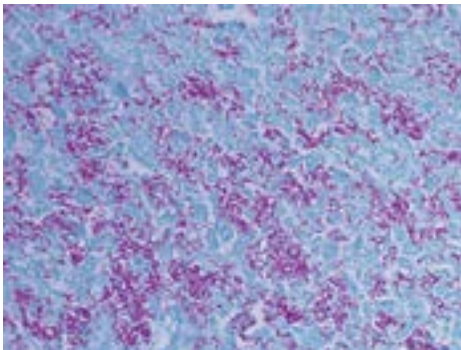


Richard-Allan Scientific 抗酸杆菌染料 (绿色复染)

Richard-Allan Scientific 抗酸杆菌染料 (绿色复染) 可鉴定组织切片中抗酸杆菌的存在, 可达到更好的染色效果, 并减少沉淀物。

- 抗酸杆菌被染成亮红色, 衬托浅绿色背景

描述	大小	数量	订单号
抗酸杆菌, 绿色复染试剂盒	1 套	单件	87015
组分			
石炭酸品红溶液	125 mL	瓶	88001
绿色速染液	500 mL	瓶	88003
分化液	500 mL	2 瓶/箱	88117

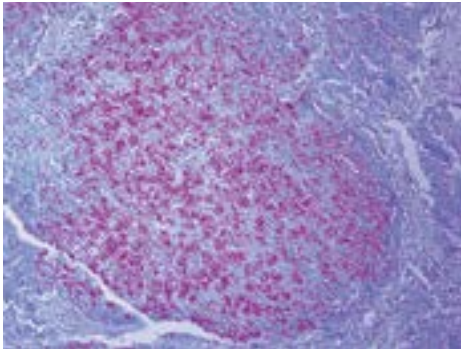


Richard-Allan Scientific 抗酸杆菌染料 (蓝色复染)

Richard-Allan Scientific 抗酸杆菌染料 (蓝色复染) 可鉴定组织切片中抗酸杆菌的存在, 可达到更好的染色效果, 并减少沉淀物。

- 抗酸杆菌被染成亮红色, 衬托浅蓝色背景

描述	大小	数量	订单号
抗酸杆菌, 蓝色复染试剂盒	1 套	单件	87016
组分			
吕氏亚甲基蓝染色液	250 mL	瓶	88002
石炭酸品红溶液	125 mL	瓶	88001
分化液	500 mL	2 瓶/箱	88117

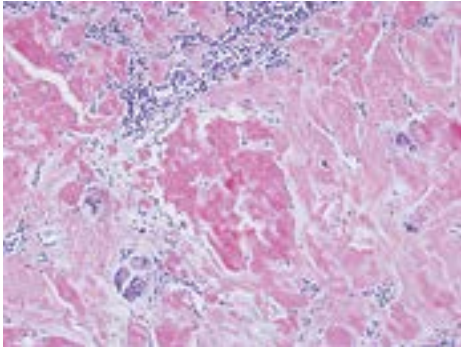


Richard-Allan Scientific 淀粉样物质染色液

Richard-Allan Scientific 淀粉样物质染色液可显示淀粉样物质。

- 碱性刚果红溶液会将淀粉样物质染成桔色到红色, 并在偏光显微镜下显示苹果绿双折射

描述	大小	数量	订单号
淀粉样物质染色试剂盒	1 套	盒	87003
组分			
氢氧化钠溶液	8 mL	瓶	88004
刚果红溶液	500 mL	瓶	88005
改良版 Mayer's 苏木精	500 mL	2 瓶/箱	88006

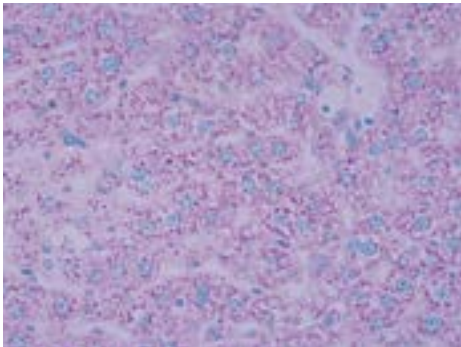


Richard-Allan Scientific 甲基绿-派洛宁 Y

Richard-Allan Scientific 甲基绿-派洛宁 Y 染料可有效鉴别组织切片和细胞学制备物中的浆细胞和 RNA。

- DNA 染成绿色, RNA 染成红色
- 浓缩 MGP 于使用前稀释

描述	大小	数量	订单号
甲基绿-派洛宁 Y	125 mL	瓶	87011

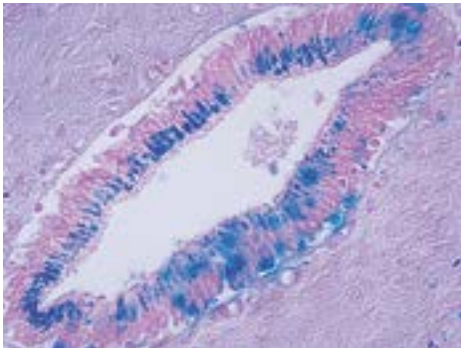


Richard-Allan Scientific 铁染试剂盒

Richard-Allan Scientific 铁染试剂盒可检测组织或血液制备物中三价铁 (含铁血黄素) 的存在。

- 对缺铁性贫血、血色沉着病和含铁血黄素沉着病的研究十分有用
- 产生普鲁士蓝反应
- 铁质染成蓝色, 细胞核染成粉红色, 细胞质染成浅粉色

描述	大小	数量	订单号
铁染色试剂盒	1 套	盒	87006
组分			
亚铁氰化钾溶液	250 mL	瓶	88013
盐酸溶液 (20%)	250 mL	瓶	88014
细胞核红硫磺染色液	125 mL	瓶	88015

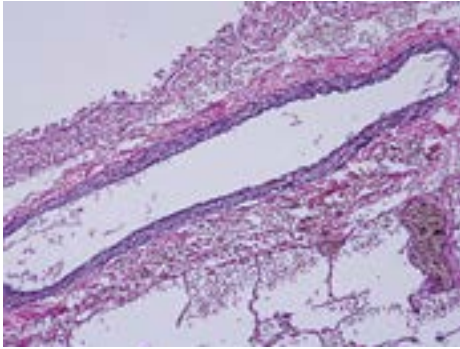


Richard-Allan Scientific 弹性染料

Richard-Allan Scientific 弹性染料基于 Verhoeff 弹性技术。

- 可鉴别弹性组织的萎缩、变薄和损失
- 也可用于鉴别血管疾病中常见的弹性片层破裂、断裂和重叠
- 弹性纤维染成深蓝色到黑色, 其上带有红色胶原, 背景为黄色

描述	大小	数量	订单号
弹性染色试剂盒	1 套	单件	87017
组分			
酒精苏木精溶液	250 mL	单件	88007
氯化铁溶液	125 mL	单件	88008
Weigert 碘溶液	125 mL	单件	88009
硫代硫酸钠溶液	500 mL	单件	88000
Van Gieson 染色液	250 mL	单件	88011

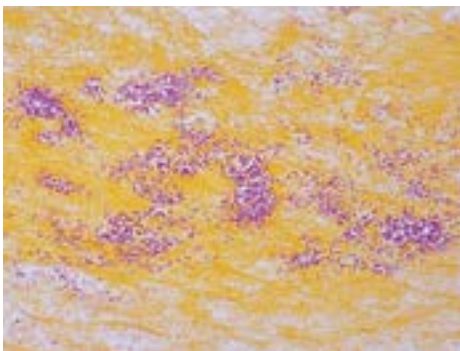


Richard-Allan Scientific 革兰氏染料 (组织)

Richard-Allan Scientific 革兰氏染料 (组织) 鉴定组织切片中的革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌。

- 革兰氏阳性微生物染成蓝色到深蓝色
- 革兰氏阴性微生物染成红色
- 柠檬黄可提供黄色背景染色

描述	大小	数量	订单号
革兰氏染色试剂盒	1 套	单件	87018
组分			
结晶紫溶液	500 mL	单件	88101
番红 O 染色液	500 mL	单件	88103
革兰氏碘液	500 mL	单件	88102
柠檬黄染色液	500 mL	单件	88012
脱色液	500 mL	单件	88104

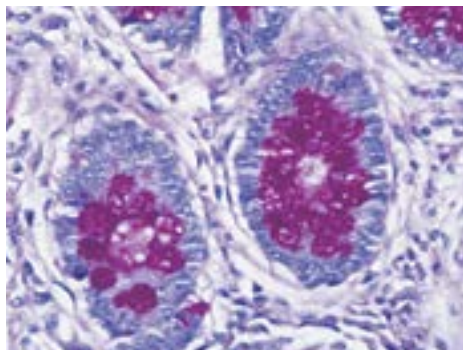


Richard-Allan Scientific 过碘酸-雪夫 (PAS)

Richard-Allan Scientific 过碘酸-雪夫 (PAS) 溶液可证实特定碳水化合物的存在和形态。

- 糖原、粘蛋白、真菌细胞壁和某些基底膜染成玫瑰色至洋红色
- 细胞核染成蓝色

描述	大小	数量	订单号
PAS 试剂盒	1 套	单件	87007
组分			
过碘酸溶液 (0.5%)	500 mL	单件	88016
雪夫试剂	500 mL	单件	88017
苏木精 1	500 mL	单件	88018

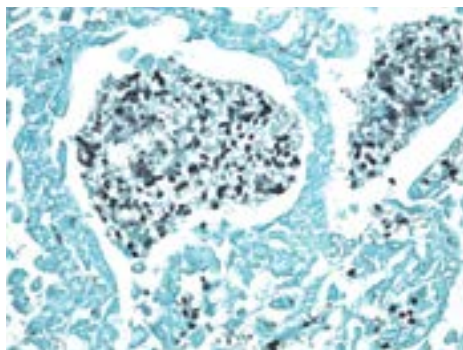


Richard-Allan Scientific 改良版 Grocott's 六亚甲基四胺银 (铬酸)

Richard-Allan Scientific 改良版 Grocott's 六亚甲基四胺银 (铬酸) 试剂盒是独特的改良版银染配方。

- 利用六亚甲基四胺/硼砂胶囊配制工作银溶液
- 可鉴别组织切片中的真菌、基底膜和条件致病菌。
- 铬酸溶液将增强对卡氏肺孢子虫、组织胞浆菌病和真菌生物的检测；消除非特异性背景染色
- 实体和网状纤维染成黑色，背景染成绿色

描述	大小	数量	订单号
六亚甲基四胺银 (铬酸) 染色试剂盒	1 套	单件	87024
组分			
甲胺硼砂胶囊		12 个单件	88023
绿色速染液	125 mL	单件	88024
硫代硫酸钠溶液	500 mL	单件	88025
偏硫酸氢钠溶液	500 mL	单件	88042
氯化金溶液	125 mL	单件	88026
5% 铬酸溶液	500 mL	单件	88041
5% 硝酸银溶液	30 mL	单件	88021

*在欧洲、中东和非洲境内不可购买

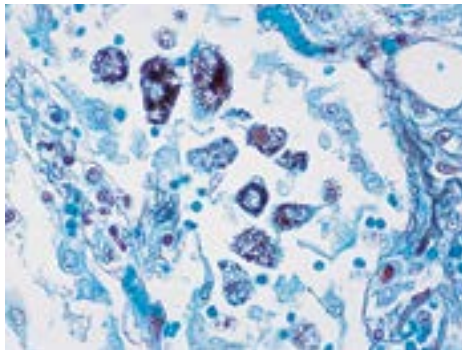


Richard-Allan Scientific 改良版 Grocott's 六亚甲基四胺银 (过碘酸)

Richard-Allan Scientific 改良版 Grocott's 六亚甲基四胺银 (过碘酸) 试剂盒是一种利用六亚甲基四胺/硼砂胶囊配制工作银溶液的独特改性银染配方。

- 利用六亚甲基四胺/硼砂胶囊配制工作银溶液
- 协助鉴别组织切片中的真菌、基底膜和卡氏肺孢子虫等条件致病菌
- 这些实体以及网状纤维被染成黑色

描述	大小	数量	订单号
六亚甲基四胺银 (过碘酸) 染色试剂盒	1 套	单件	87008
组分			
甲胺硼砂胶囊		12 个单件	88023
绿色速染液	125 mL	单件	88024
硫代硫酸钠溶液	500 mL	单件	88025
氯化金溶液	125 mL	单件	88026
1% 过碘酸溶液	125 mL	单件	88027
5% 硝酸银溶液	30 mL	单件	88036

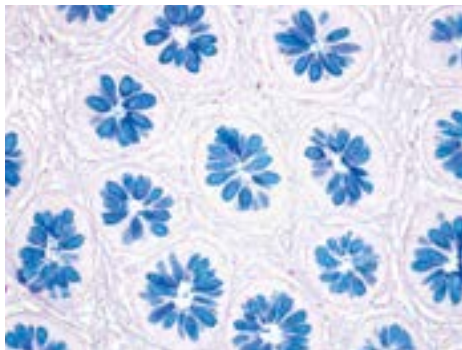


Richard-Allan Scientific 阿尔辛蓝/PAS

Richard-Allan Scientific 阿尔新蓝/PAS 特殊染色试剂盒证实中性和酸性粘液物质的存在。

- 可单独用于将组织切片上的酸性粘蛋白以及其他羧化或硫酸化酸性粘液物质染成蓝色
- 过碘酸-雪夫 (PAS) 反应用于染色糖原、基底膜和中性粘性物质

描述	大小	数量	订单号
阿尔新蓝/PAS 染色试剂盒	1 套	单件	87023
组分			
阿尔新蓝 pH 2.5 染色液	500 mL	单件	88043
0.5% 过碘酸溶液	500 mL	单件	88016
雪夫试剂	500 mL	单件	88017

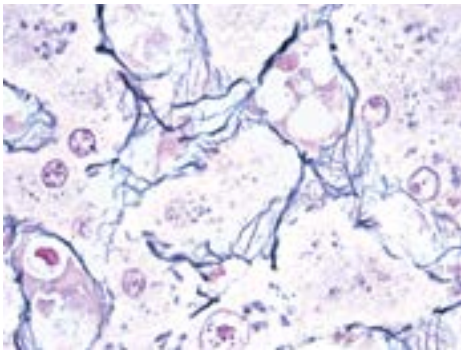


Richard-Allan Scientific 网状纤维银染

Richard-Allan Scientific 网状纤维银染料 (由 Gordon-Sweet 氏法改良) 用于鉴定和显示组织切片中的网状纤维。

- 氨银工作溶液选择性的浸透网状纤维, 并通过多种反应方式 (包括氧化反应和还原反应) 与之发生反应
- Kernechtrot 细胞核红色速染液可提供红色背景染色

描述	大小	数量	订单号
网状纤维银染色试剂盒	1 套	单件	87025
组分			
草酸溶液	125 mL	单件	88045
高锰酸钾溶液	125 mL	单件	88046
硫酸铁铵溶液	125 mL	单件	88047
还原溶液	500 mL	单件	88048
氯化金溶液 (0.1%)	125 mL	单件	88026
硫代硫酸钠溶液	125 mL	单件	88025
Kernechtrot 细胞核红色速染液	125 mL	单件	88049
10% 硝酸银溶液	125 mL	单件	88050
氢氧化铵溶液	8 mL	单件	88051
氢氧化钠溶液 (3%)	125 mL	单件	88052

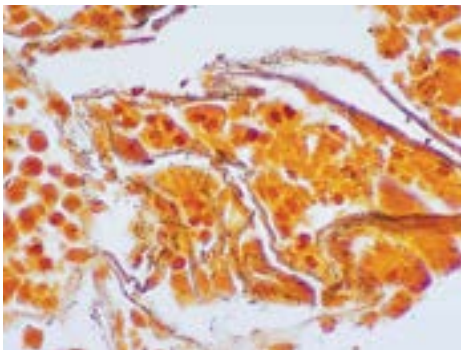


Richard-Allan Scientific Steiner-Steiner 银染

Richard-Allan Scientific Steiner-Steiner 银染确定是否存在螺旋原虫和非丝状菌。

- 细菌 (包括螺旋体和嗜肺军团菌)、杜氏小体和真菌均染成黑色
- 背景染成黄色至棕色
- 试剂盒配方和详细的程序提供一致和可重复的结果; 试剂盒不包含硝酸双氧铀

描述	大小	数量	订单号
Steiner-Steiner 银染色试剂盒	1 套	单件	87009
组分			
硝酸银溶液 #2 (滴管)*	8 mL	单件	88021
硝酸银溶液 #1	500 mL	单件	88033
乳香胶溶液	500 mL	单件	88034
对苯二酚 (胶囊)	6 个/包	2	88035
敏化剂溶液	500 mL	单件	88054

* 在欧洲、中东和非洲境内不可购买

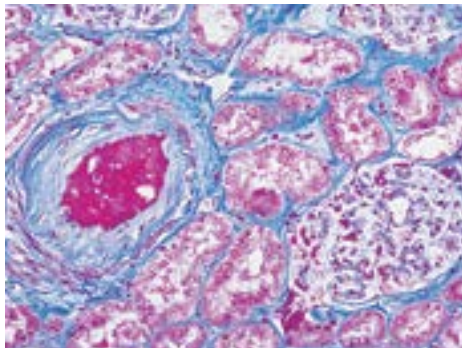


Richard-Allan Scientific Masson 三色

Richard-Allan Scientific Masson 三色试剂盒可帮助区分肿瘤中的胶原蛋白和平滑肌。

- 协助检测结缔组织疾病和肌肉组织变化
- 细胞质、角蛋白和肌肉纤维染成红色, 胶原蛋白和粘蛋白染成蓝色
- 细胞核染成黑色

描述	大小	数量	订单号
Masson 三色染色试剂盒	1 套	单件	87019
组分			
Biebrich 猩红酸品红溶液	250 mL	单件	88019
磷钨-磷钼酸溶液	250 mL	单件	88020
苯胺蓝染色液	250 mL	单件	88022
Weigert 铁苏木精 - A 部分	500 mL	单件	88028
Weigert 铁苏木精 - B 部分	500 mL	单件	88029
布安氏固定液	500 mL	单件	88038
1% 醋酸溶液	500 mL	单件	88039

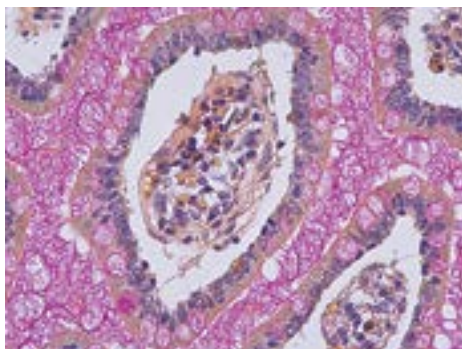


Richard-Allan Scientific 粘蛋白胭脂红

Richard-Allan Scientific 粘蛋白胭脂红染料有助于确定原发肿瘤部位。

- 可帮助辨识粘蛋白阳性腺癌中的粘蛋白阴性未分化鳞状细胞病变
- 粘蛋白染成深玫瑰色, 细胞核染成黑色
- 隐球菌(真菌)荚膜染成深玫瑰色
- 柠檬黄溶液用作黄色细胞质染料

描述	大小	数量	订单号
粘蛋白胭脂红染色试剂盒	1 套	单件	87012
组分			
柠檬黄染色液	500 mL	单件	88012
Weigert 铁苏木精 A 部分	500 mL	单件	88028
Weigert 铁苏木精 B 部分	500 mL	单件	88029
粘蛋白胭脂红原液	500 mL	单件	88037

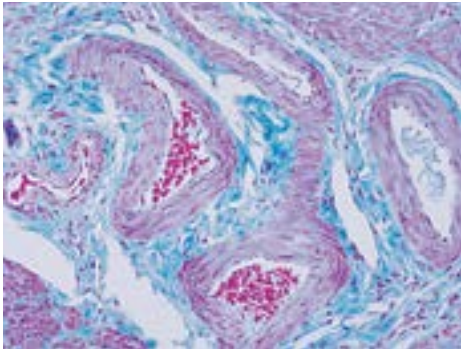


Richard-Allan Scientific Gomori 三色 (绿色胶原)

Richard-Allan Scientific Gomori 三色 (绿色胶原) 是一步法试剂盒, 使肌肉纤维呈红色, 而胶原呈绿色。

- 用于研究结缔组织疾病以及与纤维化和营养障碍病变相关的肌肉疾病

描述	大小	数量	订单号
Gomori 三色 (绿色胶原) 染色试剂盒	1 套	单件	87021
组分			
Weigert 铁苏木精 A 部分	500 mL	单件	88028
Weigert 铁苏木精 B 部分	500 mL	单件	88029
Gomori 三色染色液, 绿色胶原	500 mL	单件	88031
布安氏固定液	500 mL	单件	88038
1% 醋酸溶液	500 mL	单件	88039

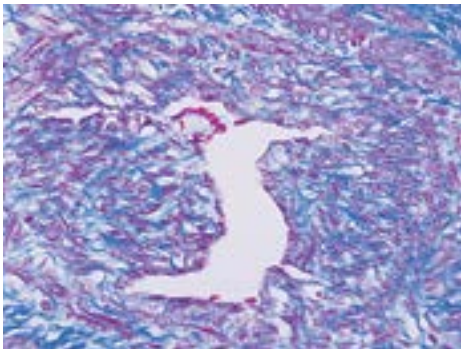

Richard-Allan Gomori 三色 (蓝色胶原)


Richard-Allan Scientific Gomori 三色 (蓝色胶原) 是一种一步法三色染色液, 可通过节省时间的简单程序实现与 Masson 三色类似的颜色区分。

- 用于研究结缔组织疾病以及与纤维化和营养障碍病变相关的肌肉疾病
- 胶原染成蓝色, 细胞质和肌肉纤维染成红色, 细胞核染成蓝色到黑色

描述	大小	数量	订单号
Gomori 三色 (蓝色胶原) 染色试剂盒	1 套	单件	87020
组分			
Weigert 铁苏木精 A 部分	500 mL	单件	88028
Weigert 铁苏木精 B 部分	500 mL	单件	88029
Gomori 三色染色液, 蓝色胶原	500 mL	单件	88038
布安氏固定液	500 mL	单件	88038
1% 醋酸溶液	500 mL	单件	88039

Richard-Allan Scientific 溶液

描述	大小	数量	订单号
石炭酸品红-抗酸染色液(冷却技术)	500 mL	单件	88106
石炭酸品红-抗酸染色液(加热技术)	500 mL	单件	88107
石炭酸品红-萆尔-纳尔逊染色液	1 L	单件	88108
鲁戈氏碘溶液(浓缩液)	500 mL	单件	88114

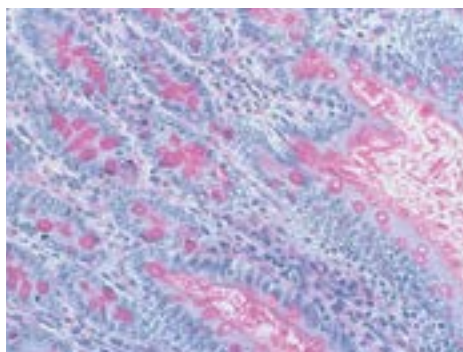


Shandon 过碘酸雪夫试剂盒 (PAS)

Shandon 过碘酸雪夫 (PAS) 用于证实多糖、中性粘膜物质和基底膜的存在。

- 试剂盒组分包括:0.5% 过碘酸、雪夫试剂、偏硫酸氢钾、酸化的 Harris 苏木精、磷酸钾缓冲液、透析酶粉

描述	大小	数量	订单号
过碘酸雪夫试剂盒	250 mL	单件	B24200-250

Richard-Allan Scientific 血液学染色液

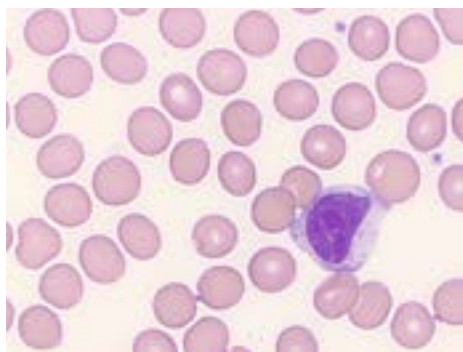


Richard-Allan Scientific 瑞氏染色液

Richard-Allan Scientific Wright Stain 瑞氏染色液是一种用于外周血和骨髓涂片的两用染色液。

- 可产生与吉姆萨染色液类似的效果,但对比度稍强

描述	数量	订单号
1 gal (3.8 L)	单件	89010
2.5 gal 方容器	单件	89011
0.95 L	单件	89012

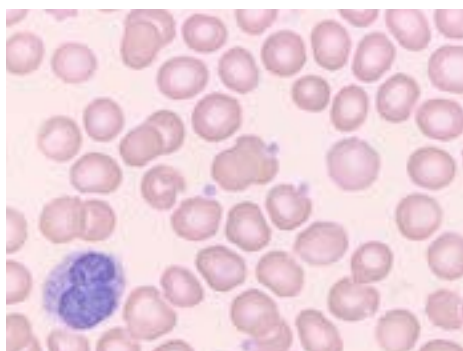


Richard-Allan Scientific 瑞氏染色剂(含缓冲液)

Richard-Allan Scientific 瑞氏染色剂(含缓冲液)可对血涂片进行快速、便捷染色,是一种含固定剂、缓冲液和染色剂的单染色剂

- 包装在 32 oz (0.95 L) 的瓶子中,易于使用;适用于自动化系统

描述	数量	订单号
32 oz (0.95 L) 瓶装	单件	3111

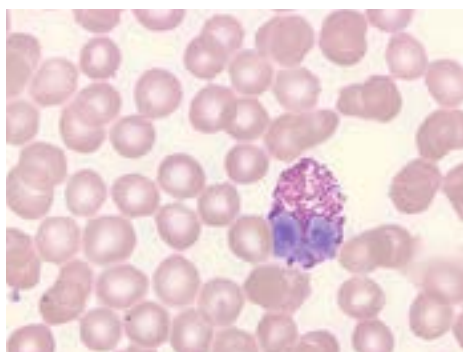


Richard-Allan Scientific 瑞氏吉姆萨复合染色剂

Richard-Allan Scientific 瑞氏吉姆萨复合染色剂是一种可用于外周血和骨髓涂片的两用染色液。

- 与吉姆萨染色剂相比,产生的颜色要暗一些,尤其是在蓝色到洋红色调中

描述	数量	订单号
32 oz (0.95 L) 瓶子	单件	89013
1 gal (3.8 L) 方容器	单件	89014
2.5 gal (9.48 L) 方容器	单件	89017

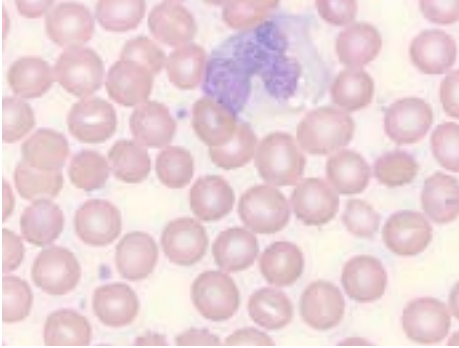


Richard-Allan Scientific 瑞氏吉姆萨复合染色剂 (含缓冲液)

Richard-Allan Scientific 瑞氏吉姆萨复合染色剂 (含缓冲液) 可对血涂片进行快速、便捷染色, 是一种含固定剂、缓冲液和染色剂的单染色剂。

- 适用于自动化系统

描述	数量	订单号
32 oz (0.95 L) 瓶装	12 瓶/箱	3121

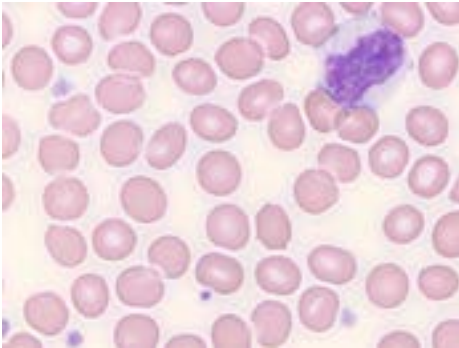

Richard-Allan Scientific May-Grunwald 染色液

Richard-Allan Scientific May-Grunwald 染色液是一种经典的血液学染色液。


描述	数量	订单号
32 oz (0.95 L) 瓶装	单件	89027

Richard-Allan Scientific 网织红细胞染色液

Richard-Allan Scientific 网织红细胞染色液 (一种特殊的血液学染色液) 鉴定未成熟红细胞。

- 未成熟的红细胞内部的细网状网络中染成蓝色; 成熟的红细胞不染色

描述	数量	订单号
125 mL 瓶装	单件	89029

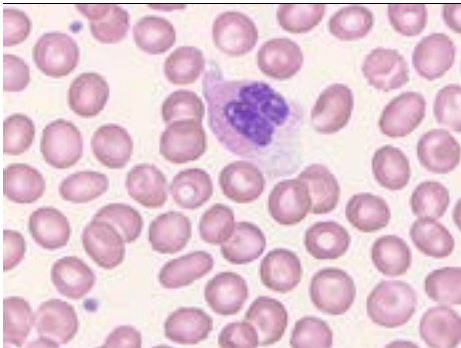


Richard-Allan Scientific Jenner 染液

Richard-Allan Scientific Jenner 染液用于对外周血涂片染色。

- 当今仍在使用的最古老的染料配方之一
- 产生与吉姆萨染色类似的结果
- 嗜酸性颗粒呈亮红色, 嗜碱性粒和核染色质染成深蓝色

描述	数量	订单号
32 oz (0.95 L) 瓶	单件	89030

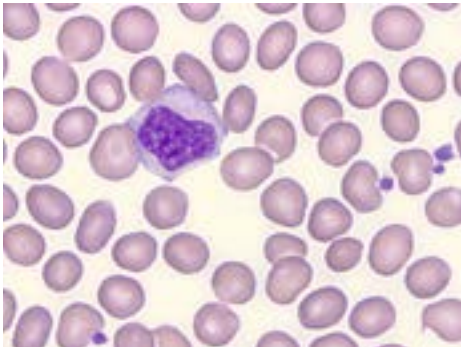

Richard-Allan Scientific 三步法染色液

Richard-Allan Scientific 三步法染色液可获得与瑞氏吉姆萨复合染色剂相当的结果。

- 染色剂可用于检测幽门螺旋杆菌
- 套装包含三个内装固定液的 500mL 瓶子
- 说明书提供浅显易懂的使用说明
- 组分也可用 1 gal (3.8 L) 的容器提供, 以方便在自动染色机上使用

描述	大小	数量	订单号
三步法染色试剂盒	3 x 500 mL	单件	3300
组分			
三步式固定剂	1 gal (3.8 L)	单件	3303
三步式溶液 A	1 gal (3.8 L)	单件	3313
三步式溶液 B	1 gal (3.8 L)	单件	3323

Richard-Allan Scientific 磷酸盐缓冲液 (6.6、7.2)

Richard-Allan Scientific 磷酸盐缓冲液与吉姆萨、瑞氏染色液及瑞氏-吉姆萨染色液结合可产生优异的结果。

- 每个一次性瓶可配置 0.26 gal (1 L)

描述	数量	订单号
磷酸盐缓冲液 pH 6.6 (粉末) 9.25 克	12 瓶/箱	89032
磷酸盐缓冲液 pH 7.2 (粉末) 9.25 克	12 瓶/箱	89033

Richard-Allan Scientific 改良瑞氏和瑞氏-吉姆萨血液学染色盒

Richard-Allan Scientific 改良瑞氏和瑞氏-吉姆萨血液学染色盒适用于 Hema-Tek™ 1、1000 和 2000 玻片染色机。

- 每盒都附带一个方便取用的包装, 内含缓冲液、漂洗剂和染料




描述	数量	订单号
改良瑞氏染色包	5 个/包	3000
改良瑞氏-吉姆萨染色包	5 个/包	3005
染色包配件		
泵管组 (3 个/包)	8 个/箱	3010
套管组 (3 个/包)	16 个/箱	3011
压板下管 (3 个/包)	8 个/箱	3012

干粉染料

经生物染色委员会认证。

描述	数量	订单号
瑞氏染料 100 克	单件	90049


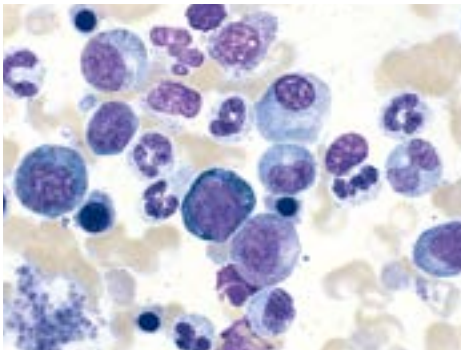


Shandon Kwik-Diff 染色剂

Shandon™ Kwik-Diff™ 染色剂是传统的瑞氏吉姆萨复合染色程序的快速替代品。

- 快速三步鉴别染色, 可用于骨髓、涂片、FNA 以及幽门螺旋杆菌等微生物
- 试剂盒组分包括: 试剂 1、固定剂; 试剂 2, 伊红; 试剂 3, 亚甲基蓝
- 可选试剂盒或者单独试剂

描述	大小	订单号
Kwik-Diff 染色试剂盒	480 mL	9990700
Kwik-Diff 染色试剂盒	120 mL	9990701
组分		
Kwik-Diff 试剂 1, 固定剂	1.06 gal (4 L)	9990705
Kwik-Diff 试剂 2, 伊红	1.06 gal (4 L)	9990706
Kwik-Diff 试剂 3, 亚甲基蓝	1.06 gal (4 L)	9990707

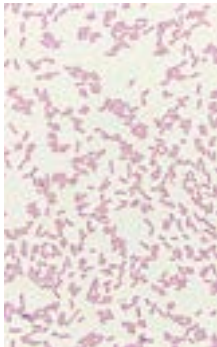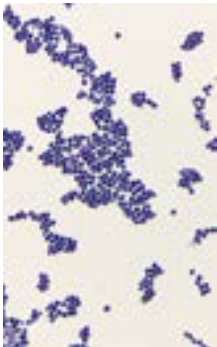

Richard-Allan Scientific 革兰氏染色试剂盒 (薄膜)

Richard-Allan Scientific 革兰氏染色试剂盒 (薄膜) 采用 Hucker 改良的革兰氏染色法, 可对培养物和患者样本中的细菌进行定性鉴别染色。

- 革兰氏阳性微生物染成紫色, 革兰氏阴性细菌染成粉红至红色

描述	大小	数量	订单号
革兰氏染料试剂盒 (薄膜)	1 套	单件	87101
组分			
结晶紫溶液	500 mL	单件	88101
革兰氏碘溶液	500 mL	单件	88102
番红 O 染色液	500 mL	单件	88103
脱色液	500 mL	单件	88104
碳酸氢钠溶液	8 mL	单件	88116

Richard-Allan Scientific 微生物试剂

描述	大小	数量	订单号
脱色液	500 mL	单件	88104

Shandon 革兰氏染色剂

Shandon 革兰氏染色剂可用作已固定涂片和组织切片的常规细菌学染色剂。

- 基于流行的 Hucker 改良
- 可证实细菌等微生物的存在, 以及鉴别革兰氏阳性菌与革兰氏阴性菌
- 提供番红 O 作为复染剂
- 可选试剂盒或者单独试剂
- 试剂盒成分包括: 结晶紫染色剂、革兰氏碘 (稳定)、脱色液和番红 O 复染剂

描述	大小	订单号
革兰氏染色试剂盒	125 mL	9990721
革兰氏结晶紫染色剂	1.06 gal (4 L)	9990725

Shandon 便携式染色试剂盒



Shandon 快速显色巴氏染色试剂盒

Shandon™ Rapid-Chrome™ 巴氏染色试剂盒可获得细针穿刺活检或高危样本的快速结果。

- 包含一个 5 玻片的玻片架和一个便携式托盘
- 试剂盒组分包括：Gill 2 苏木精、蓝化液、EA-50、100% 酒精、OG-6、95% 酒精、二甲苯和封片胶，以及一个可放置 5 张玻片的染色架
- 包装在带螺口盖的 120 mL 玻璃罐中，可填充 60ml 试剂
- 9 x 25 x 3.75 in.(22.8 x 63.5 x 9.5 cm)



Shandon 快速显色 H&E 冷冻切片染色试剂盒

Shandon 快速显色 H&E 冷冻切片染色试剂盒产生永久染色的玻片。它包含 Rapid-Fixx™，一种经济，基于酒精的福尔马林，非常适合用于固定冷冻切片中的玻片。

- 试剂盒组分包括：Rapid-Fixx 固定剂、去离子水、伊红-Y、二甲苯、Gill 3 苏木精、蓝化液、100% 酒精和固定介质，以及一个可放置 5 张玻片的染色架
- 包装在带螺口盖的 120 mL 玻璃罐中，可填充 60ml 试剂
- 9 x 18 x 4.75 in.(22.8 x 45.7 x 12 cm)



Shandon™ Rapid-Chrome Kwik-Diff™ 染色试剂盒

专门配置的 Shandon™ Rapid-Chrome Kwik-Diff™ 染色套件可进行快速、高质量鉴别染色。

- 非常适合 FNA 样本车
- 包装在带螺口盖的 120 mL 玻璃罐中，可填充 60ml 试剂
- 试剂盒组分包括：固定剂、亚甲基蓝、伊红、防溢出玻片缸、一个塑料玻片夹、Superfrost 玻片、24 x 50, No. 1 盖玻片、树胶和一个纸质玻片盘
- 9 x 18 x 4.75 in.(22.8 x 45.7 x 12 cm)

描述	数量	订单号
巴氏染色试剂盒	单件	9990020
H&E 冷冻切片染色试剂盒	单件	9990001
Kwik-Diff 染色试剂盒	单件	9990702