



Revolutionäre Gewebeverarbeitung

Epredia Revos Gewebeeinbeter

Epredia Syntri Safeguard Verbrauchsmaterialien



Effizienz neu definiert



Revos

Gewebeprozessor

Engpässe in den Arbeitsabläufen eines Labors senken den Durchsatz, verlängern die Zeit von der Gewebeentnahme bis zur Diagnose und erhöhen die Kosten.

Der EpreDia Revos Gewebeprozessor rationalisiert in Verbindung mit Syntri Safeguard Verbrauchsmaterialien die Arbeitsprozesse durch Reduzierung der Aufarbeitungsdauer. Zudem wird das Risiko von Gewebeschäden bei hoher Aufarbeitungsqualität gesenkt ohne Abstriche bei der Verarbeitungsqualität zu machen.



Schnelle Verarbeitung

Unsere einzigartige abgeschrägte Kammer verbessert die Verteilung der Reagenzien, reduziert die Dauer der Gewebeverarbeitung und ermöglicht hochwertige Verarbeitungsergebnisse.



Intelligente Überwachung



Das intelligente Reagenzien-Managementsystem des Revos verfolgt und protokolliert die Reagenziennutzung. Es speichert alle geladenen Flaschen, ausgeführten Protokolle und durchgeführten Leistungen, um Ihrem Labor die vollumfängliche Nutzung der Reagenzien zu ermöglichen.

Sichereres Arbeitsumfeld

Das Doppelfiltersystem und die Luftabsaugung des Revos schützen die Labormitarbeiter durch den kontrollierten Abzug von Lösungsmittel- und Formalindämpfen.

Gewebeschutz

Der Revos ist auf unerwartete Stromausfälle bestens vorbereitet: Die integrierte Notfall-Batterie schützt bis zu drei Stunden lang Ihre Proben und führt Ihre Protokolle weiter.

Syntri Safeguard Technologie

Anhand der Syntri Safeguard Technologie kann der Revos-Prozessor erkennen, wo im System der 100% Ethanol geladen ist, und verhindert so Verwechslungen.

Labore stehen zunehmend unter Druck, Arbeitsabläufe zu beschleunigen, Kosten zu senken und Fehler auszumerzen. Der Revos Gewebeeinbeter und die Syntri Safeguard Verbrauchsmaterialien wurden speziell entwickelt, um die Bewältigung dieser Probleme zu unterstützen.





- 1 Farbiger Touchscreen
- 2 Kammer für maximal 300 Kassetten
- 3 Lagerbereich für Reagenzien
- 4 Luftabsaugung
- 5 Kohlenstoff- und Kaliumpermanganatfilterung
- 6 USB-Port für das einfache Herunterladen von Daten

Epredia Revos Gewebeprozessor für optimierte Arbeitsabläufe

Technische Daten

Abmessungen (T x B x H)	580 mm x 850 mm x 1370 mm
Gewicht:	- Gerät = 165 kg - Gerät + übliche Reagenzien = 240 kg
Anforderungen an die Stromversorgung	100–240 V 1300 W / 110 V = 11,8 A; 1300 W / 230 V = 5,6
Notstromversorgung	Bis zu 3 Stunden
Zertifizierungen	- IEC61010 3. Ausg. - UL - CE
Anzahl der Retorten	1
Kapazität der Kassette	- Standard 300 - Mega 42
Alkoholkonfiguration	6 Flaschen
Konfiguration des Xylols/ Xylolersatzes	3 Flaschen
Fixierungskonfiguration	2 Flaschen
Anzahl der Protokolle	10
Datenverbindung	LIMS-Konnektivität über RS232-Port

Bestellinformationen

Bestellnummer

Gerät

Epredia Revos	A84100001
Epredia Revos (Chinesisches Stromkabel)	A84100002

Filter

Formaldehyd-Filter (Kaliumpermanganat-Filter); 6er-Packung	B9990612CS
Kohlefilter; 6er-Packung	7411258

Andere Zubehörteile

Adapterset für Luftabsaugkanal	A84110045
Adapterset für Hauptbelüftungssystemkanal	A78410024
Aufbewahrungsflaschen (5 l); 6er-Packung	A78410026
Wachsabfall-Schalen; 5er-Packung	8300



Eine intelligentere Lösung

Die Genauigkeit von Patiententests hängt häufig von der richtigen Vorbereitung und der Vereinheitlichung von Arbeitsabläufen im Labor ab.

Der Revos Gewebereinbeter verfolgt und protokolliert in Verbindung mit Syntri Service und Revos Reagenzien, die mit Syntri Safeguard RFID Technologie arbeiten, die Nutzung von Reagenzien. Er speichert alle geladenen Flaschen, ausgeführten Protokolle und durchgeführten Leistungen, um Ausfallzeiten zu reduzieren und Ihrem Labor die vollumfängliche Nutzung der Reagenzien zu ermöglichen.

Epredia Syntri Safeguard Verbrauchsmaterialien	
Beschreibung	Bestellnummer
Syntri Safeguard 10 % neutralgepuffertes Formalin, 4 x 5 l	5735SS
Syntri Safeguard™ Pen-Fix™, 4 x 5 l	6115SS
Syntri Safeguard Dehydrierreagenz 100 %, 4 x 5 l	6215SS
Syntri Safeguard Xylol, 4 x 5 l	6615SS
Syntri Safeguard™ Clear-Rite™ 3, 4 x 5 l	6915SS
Syntri Safeguard™ Flex™ 100, 4 x 5 l	8115SS
Syntri Safeguard Isopropylalkohol, 4 x 5 l	9517SS
Syntri Safeguard™ Formal-Fixx™, 4 x 5 l	6764215SS
Shandon™ Syntri Safeguard™ Xyloersatz, 4 x 5 l	6764515SS

4481 Campus Drive
Kalamazoo, MI 49008
USA
+1 (800) 522-7270

 Tudor Road, Manor Park
Runcorn, WA7 1TA
GROSSBRITANNIEN
+44 (0) 800 018 9396
+44 (0) 1928 534 000

Erfahren Sie mehr unter epredia.com

