



简单精确，一步到位

SlideMate AS 玻片书写仪



有效保障患者安全

患者安全已成为医疗机构的首要考量。那么，为什么还要继续使用落后的批量打印来标记载玻片呢？

在传统批量处理中，技术人员会打印数百张载玻片，然后手动将它们与样本匹配。批量打印经常会导致患者样本错配，从而危及患者的健康。

SlideMate AS 按需载玻片打印机可令您的实验室在创建患者载玻片时更加准确。玻片标记与组织切片在相同的操作空间进行。使用 SlideMate AS后，无人看管的样本、难以辨认的手写载玻片以及患者-样本匹配的误差都将成为过去。

设备如何运行？

首先，扫描具有条码的包埋盒，从而将患者数据导入载玻片标签。您需要处理不同类型的患者样本，因此直观的软件可使您通过简单的输入设备（如条形码扫描仪或触摸屏）来选择关键变量。接下来，将载玻片放到打印机中，打印机将自动打印并分配载玻片，之后就可以到水浴槽中完成捞片。



直接在切片机旁打印患者载玻片，并通过扫描患者包埋盒条码来确保准确识别

“按需打印将主要标记
错误减少了 99.8%。”

医学博士、病理学教授，
华盛顿大学医学信息部主任
Rodney Schmidt



使用 SlideMate AS 打印简单如下：



SlideMate AS 按需玻片书写仪

了解工作流程

SlideMate AS 玻片书写仪外形小巧，可直接放置在切片机旁边，使您可以扫描患者组织块条码并在打印后直接将组织切片吸附到载玻片上。

准确识别

在您的实验室中，准确识别患者载玻片对于保障患者治疗质量来说至关重要。在切片机旁按需打印载玻片可提高准确性，患者样本信息在取材后始终保持正确。

效率

批量打印患者载玻片不仅会导致患者样本识别错误增加，还会消耗更多的人力和资源。SlideMate AS 旨在实现按需打印，以消除实验室中的这些问题。

连接性

SlideMate AS 可以选择与其他计算机以及配备 Windows® 驱动程序的 LIS 或 LIMS 连接。玻片打印机也可以用作 Zebra® 或其他标签打印机的替代。SlideMate AS 可用于在实验室全流程管理中进行玻片标记，从而用于后续的自动存档和数字病理工作流程中。请与 Epredia 代表联系，以了解 SlideMate AS 可如何最佳匹配您的工作流程需求。

“使用 SlideMate 玻片书写仪打印
载玻片减少了潜在的严重影响患者
安全的错误，从而令我们能够精益
化工作流程。”

费城儿童医院解剖病理学主任 Paul Miller

可选的玻片上载槽可让您更快、
更轻松地按需打印载玻片。载玻
片可以自动从上载槽进料。

访问 www.epredia.com，
了解我们的新款 SlideMate Pro
双槽按需玻片书写仪。



SlideMate AS 打印机订购信息

系统	订单号
SlideMate AS 基本打印机 SlideMate AS 基本打印机具有彩色触摸屏、电源、电源线和 Windows® 打印机驱动程序软件，可从图像文件打印外部生成的载玻片标签	A83900001
SlideMate AS 基本打印系统 SlideMate AS 基本打印机具有载玻片传送系统、彩色触摸屏、电源、电源线和 Windows® 打印机驱动程序软件，可从图像文件打印外部生成的载玻片标签	A83900002
SlideMate AS 按需打印机 SlideMate AS 按需打印机具有彩色触摸屏、内置扫描仪、电源、电源线和高级软件，可实现标签创建、特殊面板打印以及从 LIS 导入	A83900004
SlideMate AS 按需打印系统 SlideMate AS 按需打印机具有载玻片传送系统、彩色触摸屏、内置扫描仪、电源、电源线和高级软件，可实现标签创建、特殊面板打印以及从 LIS 导入	A83900005
配件	目录编号
热转印碳带	A83910001
载玻片传送系统	A83910002
SlideMate AS 载玻片传送系统的备用载玻片料斗	A83920016
网关软件 (1 个单元)	A83910005
多网关软件 (最多 10 个单元)	A83910009
打印头清洁套件	A83910008

SlideMate AS 玻片书写仪规格

尺寸: SlideMate AS 打印机	
深 x 宽 X 高	230 x 122 x 290 毫米 9.1 x 4.8 x 11.5 英寸
尺寸: 带有载玻片传送系统和上载槽的 SlideMate AS 打印机	
深 x 宽 X 高	230 x 122 x 470 毫米 9.1 x 4.8 x 18.5 英寸
打印机重量	4 公斤, 9.5 磅
电源要求:	通用 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz, 最大 1.2A
载玻片类型	25 毫米 x 75 毫米 x 1 毫米 或 1 英寸 x 3 英寸
打印速度	借助载玻片传送系统可实现每分钟最多 9 张载玻片 手动进料可实现每分钟最多 12 张载玻片
介质类型	热转印碳带
介质容量	1 卷, 每卷约 12,000 张载玻片
介质颜色	黑色
连接性	以太网, USB-A (2), USB-B (1)

Epredia 的 SlideMate 载玻片和 SlideMate Plus 防脱载玻片

Epredia 提供的 SlideMate™ 显微镜载玻片专为 SlideMate AS 载玻片打印机而设计，可实现清晰、干净的打印。SlideMate 载玻片可帮助减少手写标签与 SlideMate AS 载玻片打印机配对时常出现的识别问题。

*与 SlideMate 载玻片一起使用时，SlideMate AS 打印机的热度设置可能需要降低。每台 SlideMate AS 打印机应分别进行优化。

SlideMate 显微镜载玻片

- 白色标签, 25 x 75 x 1 毫米, 磨砂边, 90° 角
- 每包 72 个载玻片, 每盒 20 包

美国/加拿大:

TT-40411-8217-001

其他: TT-40418217-W

SlideMate Plus 防脱载玻片

- 白色标签, 25 x 75 x 1 毫米, 磨砂边, 90° 角
- 每包 72 个载玻片, 每盒 20 包

美国/加拿大:

TT-40411-PS-8218-1

其他: TT-40418218-PS-W

Epredia - Breda
Essendonk 30 | 4824 DA Breda
NETHERLANDS
德国: sales.de@epredia.com
比卢荷经济联盟: sales.bnl@epredia.com
英国: sales.uk@epredia.com

Epredia - Kalamazoo
4481 Campus Drive
Kalamazoo, MI 49008
UNITED STATES
(800) 522-7270

请访问 epredia.com, 了解更多内容

© 2020 Epredia Group. 版权所有。除非另有说明，否则所有商标均为 Epredia 及其子公司的财产。Windows® 是 Microsoft® 的注册商标。Zebra® 是 Zebra Technologies® 的注册商标。这些产品并非在所有地区都有销售。请与您当地的销售代表联系以获取更多信息。M43025 R102020

epredia Enhancing precision cancer diagnostics

POWERED BY SHANDON MICROMENZEL-GLASER